



4

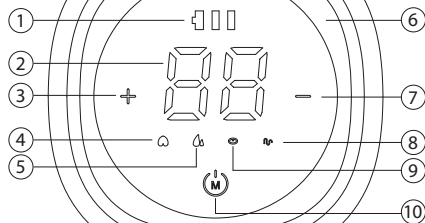

5

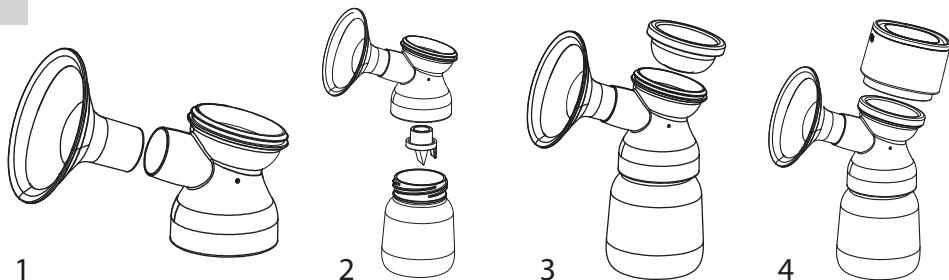

Преносима електрическа помпа за кърма Power Pump

Модел: 20/107

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С БЕЗОПАСНОСТТА. Прочетете **внимателно всички инструкции**, преди да използвате ПОМПАТА ЗА КЪРМА. ПРОДУКТЪТ е предназначен само за домашна употреба.

ВАЖНИ КОМЕНТАРИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА

Винаги спазвайте основните предпазни мерки при използване на електрически уреди, особено когато наблизко има деца. Прочетете всички инструкции, приложени към този продукт, преди да го използвате. Спазвайте инструкциите за потребителя. В противен случай може да възникне нараняване или повреда на помпата за кърма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уверете се, че използвате захранване, което отговаря на спецификациите на помпата за кърма.
- Дръжте захранването далеч от източници на топлина.
- Когато изключвате захранването, първо извадете щепсела от контакта и след това от помпата за кърма.
- Избягвайте да използвате или съхранявате помпата за кърма на места, където тя може лесно да падне във ванна или мивка.
- Можете да стерилизирате частите на помпата за кърма чрез изваряване. Корпусът на помпата за кърма не е устойчив на топлина, така че го дръжте далеч от източници на топлина и открит пламък.
- Не използвайте електрическата помпа за кърма в близост до запалими материали.
- Не оставяйте уреда включен без надзор.
- Не използвайте помпата за кърма, ако нейното захранване или кабели са повредени.

Не я използвайте, ако е била изпускана, повредена или не работи правилно. Ако откриете признаци на повреда, незабавно спрете да използвате уреда и се свържете с: service@canpolbabies.com.

- Не използвайте електрическата помпа за кърма, ако е била в контакт с вода или други течности. Ако уредът е паднал във вода или друга течност, не го докосвайте и незабавно изключете захранването от контакта.
- Не намокряйте помпата за кърма и не я потапяйте във вода или други течности.
- Не наливайте вода върху помпата за кърма.
- Не използвайте помпата за кърма под душа или във ваната.
- Не излагайте уреда на високи температури.
- Не забравяйте, че може да възникне късо съединение, ако USB Type-C портът или батерията влязат в контакт с метал или течност.
- Продуктът не трябва да бъде обслужван или ремонтиран. Не ремонтирайте уреда сами. Не модифицирайте уреда.
- Не използвайте повредена помпа за кърма. Незабавно сменете повредените или износени аксесоари с нови.
- Използвайте помпата за кърма само за целите, описани в тази инструкция за потребителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Преносимата електрическа помпа за кърма Canpol babies PowerPump е идеална за стимулиране на лактацията в първите дни след раждането, когато имате трудности при започване на лактация, например след цезарово сечение или при недостиг на кърма. Редовното изцеждане на кърма от самото начало може да помогне за стабилизиране и увеличаване на производството на мляко. Помпата за кърма с вграден контролен панел е удобна за употреба. Надяваме се, че нашата помпа за кърма ще ви достави много удовлетворение и удоволствие. Преди да използвате продукта, прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Запазете я за бъдещи справки, тъй като съдържа важна информация.

1. ПОДДРЪЖКА НА БАТЕРИЯТА

Помпата за кърма съдържа вградена (несменяема) литиево-полимерна батерия, която може да се презаредва.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Ако батерията е напълно разредена, не използвайте помпата за кърма веднага след като я свържете към захранването. Оставете помпата за кърма включена към захранването поне 20 минути, преди да опитате да я включите.
- За да поддържате батерията на помпата за кърма в добро техническо състояние, проверете дали захранването отговаря на напрежението и тока, посочени в спецификацията на продукта, преди да я използвате.
За да поддържате правилния жизнен цикъл на батерията:
- Съхранявайте помпата за кърма на хладно място.
- Заредете батерията, преди да се е разредила напълно. Това е полезно за поддържане

на ефективността на батерията.
- Заредете напълно батерията, преди да приберете помпата за кърма.
- Ако индикаторът за батерията мига по време на употреба или мига, когато уредът е включен, това означава, че батерията е слаба. След като видите това трябва да се зареди.
- Индикаторът на батерията мига по време на зареждане. Ще спре да мига, когато батерията е напълно заредена.
- Ако помпата за кърма е била съхранявана на горещо място, не трябва да се използва веднага. За да възстановите нормалната работа на батерията, изчакайте един час уреда да изстине.
През това време помпата за кърма може да се зарежда чрез захранване, включено в контакта.

2. БЕЛЕЖКИ, СВЪРЗАНИ С ЗАРЕЖДАНЕТО

ЗАБЕЛЕЖКА

Режим на захранване

- Следвайте стриктно реда на операциите, както е посочено по-долу.
- **Винаги използвайте DC5 V, 1A захранване. Захранването не е включено в комплекта.**

- Уверете се, че захранването отговаря на напрежението в контакта.
- Свържете USB Type-C кабела на захранването към корпуса на уреда Фиг. 1.
- Поставете щепсела на захранването в контакта. Не включвайте корпуса на уреда, докато свързвате. Фиг. 2

3. КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА Фиг. 3

1. Контролен панел
2. Силиконова мембрана
3. Тъло на помпата за кърма
4. Антивзвратен клапан
5. Контейнер за мляко
6. Фуния 22 мм,
7. Захранващ кабел тип C (зарядно не е включено в комплекта).

4. РАБОТА С КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

Описание на функциите от контролния панел Фиг. 4

1. индикатор за нивото на батерията
2. дисплей за режим и време
3. бутон за увеличаване на нивото
4. режим на стимулиране на гърдите
5. режим на изцеждане на кърма

6. дисплей
7. бутон за намаляване на нивото
8. смесен режим
9. режим на кърмене
10. бутон за включване/изключване

4 - режим за стимулиране на гърдите - подготовка на гърдите за изтичане на кърма, стимулиране на лактацията,
5 - режим на изцеждане на кърма, Редовното изцеждане на кърма от самото начало може да помогне за стабилизиране и увеличаване на производството на мляко. Помпата за кърма с вграден контролен панел е удобна за употреба. Надяваме се, че нашата помпа за кърма ще ви достави много удовлетворение и удоволствие. Преди да използвате продукта, прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Запазете я за бъдещи справки, тъй като съдържа важна информация.

Можете да зададете от 1 до 15 нива на мощност за всеки режим, като използвате бутоните „плюс“ и „минус“.

5. ПОЧИСТВАНЕ И СРЕРИЛИЗАЦИЯ

•Пазете продукта чист.

•Преди първа и всяка следваща употреба измийте мембраната, тялото, клапана и контейнера за мляко. Можете да ги поставите за 5 минути във вряща вода или да ги стерилизирате в парен стерилизатор. Не стерилизирайте фунията по такъв начин. Преди първа употреба и след всяка следваща употреба измийте фунията под течаща вода с мек почистващ препарат, изплакването обилно с топла вода. Запейте с вряща вода.

•Не мийте и не стерилизирайте устройството за управление в парен стерилизатор, избършете с мека или леко влажна, добре изстискана кърпа.

•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При почистване боравете внимателно с антивъзвратния клапан и силиконовата мембрана, ако са повредени, помпата за кърма няма да функционира правилно.

•За да почистите антивъзвратния клапан, измийте го внимателно, без да използвате никакви предмети, тъй като това може да доведе до повреда.

•Преди употреба се уверете, че няма останала вода в силиконовата мембрана, за да предотвратите повреда на контролното устройство.

•Съхранявайте всички части в защитно помещение.

•Ако имате някакви съмнения относно безопасността на продукта, моля, свържете се с дистрибутора или производителя.

6. МОНТАЖ

Съвети за сполучване:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Преди да докоснете каквито и да е части на помпата за кърма или гърдите си, измийте ръцете си старателно със сапун и вода (по-малко за една минута) и ги подсушете с чиста кърпа или хартиена кърпа за еднократна употреба.

- Не забравяйте, че контейнерите за мляко и техните части могат да се повредят при неправилна употреба (напр. поради падане, прекалено затегане или преобръщане).

- Трябва да се внимава, когато се използват съдове за мляко и техните елементи.

- Използвайте само оригинални електрически части на помпата за кърма. Използването на заместители може да причини необратими щети.

- Преди сполучване се уверете, че всички части са напълно сухи.

- Сполучете всички части внимателно, съгласно стъпки по-долу, според инструкциите. В противен случай помпата за кърма може да не генерира подходящ вакуум.

7. УПОТРЕБА

•Измийте добре ръцете си преди употреба. Уверете се, че всички части на помпата за кърма са старателно почистени и проверете отново дали са правилно сполучени.

•Преди употреба поставянето на топла кърпа и масажирането на гърдите може да засили ефекта от изцеждането. Седнете удобно и се отпуснете, като поставите подложка под крака си, за да ги поддържате, това помага за поддържане на правилна стойка и предотвратява натиска върху гърба ви.

•Преди употреба не забравяйте, че кожата на гърдите и фунията трябва да са сухи.

•Поставете сполучената към уреда фуния и я притиснете плътно към гърдата, докато поддържате гърдата си с другата ръка, за да осигурите плътно прилепване.

•Натиснете бутон за захранване, за да включите уреда, който автоматично ще премине в режим на стимулация. Сега можете да изберете режима по ваш избор.

•Докато уредът работи, натискането на бутон за увеличаване или намаляване на силата позволява избор от 1 до 15 нива на интензивност на избиран режим.

•За да изберете или регулирате нивото на мощност, което е подходящо за вас в избиран режим, постепенно увеличавайте мощността, докато почувствате лек дискомфорт (не болка), след което намаляете леко мощността.

•След като приключите с изцеждането натиснете и задръжте бутон за захранване за 2 секунди, за да изключите уреда.

•Уредът не запомня последните ви настройки и не преминава автоматично в друг режим.

След употреба измийте всички части на помпата за кърма според инструкциите за почистване.

8. СЪХРАНЕНИЕ НА КЪРМА

•Поради активните биохимични и микробиологични процеси, протичащи в кърмата, опитайте се да я съхранявате при постоянна температура.

•Изцедената кърма може да се съхранява в шишета, стерилни торбички или херметически затворени контейнери с капак (които трябва да се стерилизират преди всяка употреба).

•Маркирайте всеки съд с изцедена кърма с дата.

•Замразявайте само прясно изцедена кърма. Не пълнете съда до ръба, тъй като замразеното мляко увеличава обема си.

•Изцедената и замразена кърма може да се размразява по същия начин, както другите хранителни продукти, освен в микровълнова фурна. (Използването на микровълнова фурна може да лиши кърмата от ценни хранителни вещества и антигела).

•Замразената кърма може да се размрази за една нощ в хладилника и след това да се затопли постепенно в нагревател за шишета или в гореща вода.

•Разклатете или разбъркайте кърмата след размразяване, за да свържете отделните мастни молекули с останалия обем мляко.

Тип кърма	Температура (°C)	Препоръчително време за съхранение
Прясна кърма	+4°C	до 96 часа
	от +4°C до +15°C	максимум до 24 часа
	+19°C до +25°C (стаяна температура)	оптимално до 4 часа
Замразена кърма	от +25°C до +37°C	максимум до 4 часа
	-20°C	оптимално до 3-6 месеца
Размразена кърма	+4°C	до 24 часа (до пълното ѝ размразяване)
	от +25°C до +37°C	до 4 часа

9. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Модел: 20/107

Тегло : 237g

Параметри на зарядното устройство: 110-240V, 50-60 Hz / мощност 5V / 1A

Вградена батерия 3.7V 1200mAh

Генерирано отрицателно налягане 42 ± 3 kpa (360 mmHg)

Време за зареждане: около 2ч

Време за работа: 2 часа, 4 цикъла

20_107_instrukcja_150x115_ms002.indd 74-75

08.01.2025 09:13:37